



ROMÂNIA  
AGENȚIA  
NAȚIONALĂ  
ANTI-DOPING

# PROCEDURA PAS CU PAS

## Prelevarea sângelui uscat (DBS)





ROMÂNIA  
AGENȚIA  
NAȚIONALĂ  
ANTI-DOPING

# PROCEDURA PAS CU PAS

## Prelevarea sângelui uscat (DBS)

O porțiune a umărului trebuie să fie accesibilă pentru prelevarea sângelui. Încălzirea pielii prin frecarea viguroasă a brațului poate încuraja fluxul sanguin al pielii și poate ajuta la prelevare. Spre deosebire de o prelevare standard de sânge venos, sportivul nu trebuie să fie așezat timp de 10 minute înainte de prelevare și nu există restricții în ceea ce privește exercițiile anterioare.



1





ROMÂNIA  
AGENȚIA  
NAȚIONALĂ  
ANTI-DOPING

# PROCEDURA PAS CU PAS

## Prelevarea sângelui uscat (DBS)



2

Pielea va fi curățată cu un tampon cu alcool și lăsată să se usuce la aer.



3

Dispozitivul Tasso M20 va fi aplicat pe pielea curată, iar sportivul (sau ofițerul de control doping (OCD) dacă preferă) va apăsa butonul roșu pentru a începe prelevarea. Va urma o înțepătură mică, ca o bandă de cauciuc care se fixează pe piele, ceea ce înseamnă că dispozitivul Tasso M20 funcționează corect.



ROMÂNIA  
AGENȚIA  
NAȚIONALĂ  
ANTI-DOPING

# PROCEDURA PAS CU PAS

## Prelevarea sângelui uscat (DBS)



4

Prelevarea este completă atunci când toate cele patru pete sunt roșii, ceea ce poate dura 3-5 minute. Dispozitivul este apoi îndepărtat și un mic bandaj este aplicat pe braț.



ROMÂNIA  
AGENȚIA  
NAȚIONALĂ  
ANTI-DOPING

# PROCEDURA PAS CU PAS

## Prelevarea sângelui uscat (DBS)



5

Cartușul de prelevare este scos din dispozitivul de prelevare prin plasarea limbii dispozitivului de prelevare în canelura kitului de securitate și împingerea în jos. Cartușul este plasat în compartimentul kitului de securitate cu partea albă orientată spre stânga.

# PROCEDURA PAS CU PAS

## Prelevarea sângelui uscat (DBS)



6

Odată ce cartușul a fost aerisit prin îndepărtarea benzii, spuma neagră este îndepărtată și kitul de securitate poate fi închis. Se aplică un sigiliu de securitate cu evidențierea desfacerii.



ROMÂNIA  
AGENȚIA  
NAȚIONALĂ  
ANTI-DOPING

# PROCEDURA PAS CU PAS

## Prelevarea sângelui uscat (DBS)



7

În cele din urmă, kitul de securitate este plasat într-o pungă rezistentă la lumină și este gata de expediere.